

# INSTRUCTIVO DE TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS DE PELO EN BOVINOS



## PASO 1)

Verificar que las genealogías coincidan con el animal al que se le va a tomar la muestra (tatuajes, marcas, orejeras u otras)

## PASO 2)

Inmovilizar el animal con el fin de evitar accidentes en el personal encargado de la toma de las muestras y limpiar el área de toma de muestra removiendo los pelos y material extraño que esté presente.



## PASO 3)

Halar con un solo movimiento y cerca de la piel, entre 30 y 40 pelos de la borla de la cola.



## PASO 4)

Una vez arrancados, examinar si los pelos tienen en su raíz el folículo piloso. Si la mayoría de pelos no tiene el folículo se recomienda tomar nuevamente la muestra.



## PASO 5)

Se recomienda agrupar en un solo muñón los pelos arrancados e introducirlos en un sobre de papel etiquetado, marcado previamente con el nombre del animal, número de registro o de tatuaje, raza, fecha y sexo.

